

INSTRUÇÕES DE USO - ANDALAN CAYA® GEL

A proteção oferecida pelo **Andalan Caya® Gel** está diretamente relacionada ao correto uso em conjunto com um Diafragma (p.ex. **Andalan Caya® Diafragma**), portanto, leia atentamente as instruções abaixo antes de utilizá-lo.

Andalan Caya® Gel é um gel contraceptivo feminino para utilização com Diafragma (p. ex., Andalan Caya® Diafragma), como método contraceptivo de barreira.

Aplicação:

Antes da introdução na vagina, aplique uma colher de chá (aproximadamente 4 ml) de **Andalan Caya® Gel** no diafragma (p. ex. **Andalan Caya® diafragma**).

O gel de celulose forma uma barreira mecânica adicional entre o diafragma e o colo do útero. O ácido láctico, com o valor de pH fisiológico, de 3.8 tem um efeito inibidor da motilidade dos espermatozoides, sendo o seu movimento de avanço abrandado ou mesmo inibido.

Composição:

Água, ácido láctico, lactato de sódio, celulose, ácido sórbico, baunilha.

Conservação:

Conservar em local seco em temperaturas entre 4°C e 25°C.

Manter a bisnaga sempre fechada.

Prazo de validade: ver impressão na bisnaga

Uma vez aberto, utilizar no prazo de 3 meses.

As bisnagas vazias podem ser descartadas no lixo doméstico.



3093-5220

INTERNATIONAL Efeitos secundários:

Av. Brig. Faria Lima, 1912 –13º andar – Conj. I/J/M
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 01451-000
Tel.: (55-11)

Fax: (55-11) 3034-0121

Graças ao seu pH, Andalan Caya® Gel é compatível com a flora vaginal.

Pode ser aplicado várias vezes e o tempo que se desejar. Se observar efeitos secundários durante a aplicação, interrompa a utilização de Andalan Caya® Gel e consulte o seu médico antes de voltar a utilizar.

Interações: Nenhuma

conhecida

Contraindicações:

Não houve relatos de efeitos colaterais durante o uso do **Andalan Caya® Gel**.

Andalan Caya® Gel não pode ser utilizado em caso de hipersensibilidade ou alergia conhecida a um dos seus componentes. No caso de ocorrer prurido ou urticária, deve interromper a aplicação do gel e consultar o seu médico.

Advertência:

Notifique o fabricante ou a autoridade competente se ocorrerem incidentes graves durante a utilização de Andalan Caya® Gel.

Andalan Caya® Gel NÃO protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Só é eficaz quando usado em conjunto com o diafragma (p. ex. **Andalan Caya® diafragma**).

Andalan Caya® Gel utilizado como único contraceptivo, sem uma barreira mecânica não constitui um método contraceptivo seguro.

Andalan Caya® Gel é solúvel em água e compatível com preservativos de látex de borracha natural ou de poliuretano.

Utilização do aplicador vaginal:

A utilização do aplicador vaginal é opcional, caso se pretenda aplicar mais do **Andalan Caya® Gel** ao diafragma já inserido, antes de uma nova relação sexual:

1. Coloque o aplicador no **Andalan Caya® Gel**, fixe o aplicador na bisnaga e pressione com cuidado o gel para fora da bisnaga, até alcançar a marca da dosagem indicada 4 ml.
2. Retire o aplicador da bisnaga.
3. Introduza o aplicador na vagina com a abertura para a frente.



3093-5220

Av. Brig. Faria Lima, 1912 –13º andar – Conj. I/J/M
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 01451-000
Tel.: (55-11)

Fax: (55-11) 3034-0121

INTERNATIONAL

4. Logo que o aplicador estiver corretamente posicionado a frente do diafragma, esvazie-o pressionando o êmbolo suavemente.
5. Retire o aplicador vazio da vagina, sem puxar pelo êmbolo, caso contrário, o gel voltará para o interior do aplicador.
6. O aplicador vaginal é reutilizável. O aplicador deve ser lavado com água quente após cada utilização.

FABRICADO POR:

DeltaMed GmbH, Raiffeisenstr. 8 a 61169 Friedberg, Germany

IMPORTADO POR:

DKT do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 13º andar Conj. I/J/M - São Paulo - SP – BRASIL - CNPJ:

38.756.680/0001-40 - Farm. Resp.: Simone Gomes Sant'Anna CRF-SP 39866

SAC: 0800 0 11 12 13 Registro

ANVISA: 10208250051

sac@dk.com.br

Conteúdo:

01 aplicador

01 bisnaga de **Andalan Caya® Gel** de 60g

01 manual de instruções

Símbolos:



Observar as instruções de utilização.
Consulte las instrucciones de uso.



Fabricante



Uma vez aberto, utilizar no prazo de 3 meses.
Una vez abierto el producto utilizarlo en un plazo de 3 meses.



Gama de temperatura
Limitación de la temperatura



Data de fabrico
Fecha de fabricación



Designação/número de lote
Denominación/número de lote



Usar até
Fecha de caducidad

OBSERVAÇÃO: A mesma arte será utilizada no Brasil e nos países de América latina e, portanto, terá informações em Português e espanhol além dos dados dos países onde o produto será comercializado pela DKT.