



Av. Brig. Faria Lima, 1912 – 13º andar – Conj. I/J/M
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 01451-000
Tel.: (55-11) 3093-5220
Fax: (55-11) 3034-0121

HISTERÔMETRO ANDALAN

INDICAÇÃO DE USO:

O HISTEROMETRO ANDALAN destina-se ao uso médico para medir a profundidade da cavidade uterina para auxiliar na correta colocação do dispositivo intrauterino (DIU) ou sistema intrauterino (SIU). É um produto estéril a menos que a embalagem esteja violada. O fabricante recomenda uso único.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO MECANISMO DE AÇÃO:

O HISTEROMETRO ANDALAN deve ser manuseado por um médico habilitado. É introduzido através do colo uterino para que seja medida a profundidade do útero da mulher, através de uma escala numérica marcada no dispositivo.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Preparar a vagina e o colo do útero para um procedimento intrauterino asséptico.
2. Expor o colo do útero usando um espéculo adequado.
3. Dilatar o canal cervical até 6 mm.

Nota: Pode ser necessário dilatar até 8 mm em pacientes com um canal cervical apertado. 4. Insira suavemente o HISTEROMETRO ANDALAN para determinar a profundidade e a direção da cavidade do útero.

5. Pode ser necessário prender o colo do útero com um tenáculo. Se o útero estiver retrovertido, prenda a borda posterir do colo. Aplique suave tração para endireitar qualquer curvatura cervical.
6. Inserir o histerometro prestando atenção na escala numérica. Tenha cuidado adicional para não perfurar o útero.
7. O HISTEROMETRO ANDALAN deve ser inserido suavemente até passar o canal cervical e para dentro da cavidade uterina. Descontinue qualquer tração aplicada com um tenáculo.
8. Quando o HISTEROMETRO ANDALAN encostar na cavidade uterina, faça a medição da profundidade do útero através da escala numérica marcada no HISTEROMETRO.
9. O HISTEROMETRO deve ser suavemente removido do útero.

Av. Brig. Faria Lima, 1912 – 13º andar – Conj. I/J
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 01451-000 Tel.:
(55-11) 3093-5220
Fax: (55-11) 3034-0121



10. O fabricante recomenda o uso único do HISTEROMETRO ANDALAN. Para realizar o descarte quebre o HISTEROMETRO ANDALAN empurrando os lados do dispositivo na marcação "Ponto de Quebra". Ao aplicar pressão, o histerometro deve dobrar e então pode ser descartado com segurança.

ADVERTÊNCIAS:

O HISTEROMETRO ANDALAN deve ser manuseado por um médico habilitado.

PRECAUÇÕES

O HISTEROMETRO ANDALAN deve ser manuseado por um médico habilitado e com técnicas assépticas. Antes do uso, verifique se a embalagem não está violada.

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.

Riscos de reuso:

O reuso do dispositivo pode levar a paciente a contrair uma infecção.

Riscos de infecção cruzada.

CONTRAINDICAÇÕES:

1. O procedimento é contraindicado em suspeita de gravidez ou em mulheres com doença pélvica inflamatória aguda.
2. Também é contraindicado em mulheres com infecções cervicais crônicas ou qualquer condições não seja recomendado um procedimento cirúrgico ambulatorial.
3. Contraindicado em pacientes que estejam usando dispositivo intrauterino (DIU) ou sistema intrauterino (SIU).

IMPORTANTE:

O HISTEROMETRO ANDALAN deve ser manuseado por um médico habilitado.

Produto para uso ginecológico, sua esterilidade é assegurada enquanto esta embalagem não for danificada ou aberta.

Ao utilizar o HISTEROMETRO ANDALAN, o médico deve ter cuidados para evitar perfurar a parede uterina da paciente.

Av. Brig. Faria Lima, 1912 – 13º andar – Conj. I/J
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 01451-000 Tel.:
(55-11) 3093-5220
Fax: (55-11) 3034-0121

O descarte do histerometro deve ser realizado em local próprio para materiais potencialmente contaminados.



O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.

ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril – esterilizado por radiação gama.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Armazenar à temperatura ambiente e livre de umidade.

Os produtos devem ser transportados à temperatura ambiente e ao abrigo da umidade e luz solar.

PRAZO DE VALIDADE

O Histerômetro Andalan têm prazo de validade de 05 (cinco) anos.

FABRICADO POR:

PREGNA INTERNATIONAL LTD.

PLOT N° 219, SURVEY N°168, DABHEL INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETY LTD., DABHEL,
DAMAN – 396 210, ÍNDIA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA. - CNPJ: 38.756.680/0001-40.

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912 - 13° ANDAR - CONJ. I/J/M - SÃO PAULO – SP

Farm. Resp.: Simone Gomes Sant'Anna CRF-SP 39.866

HISTERÔMETRO ANDALAN- cadastro ANVISA N° 10208259002